



MANUEL D'UTILISATION (IFU)

BBB Med S9001

BBB
BODY BOOST BED

Table des matières

3	À lire au préalable
4	Restrictions d'utilisation
4	Avertissements pour le client
5	Information générale du BODY BOOST BED BBB S9001
5	Fonction de préchauffage « WellTherm »
6	Technologie multifréquence
7	Protocoles
7	Instructions d'opération de votre BBB S9001
8	Fonctionnement
9	Contrôle des fonctions
11	Messages
12	Nettoyage de votre BBB S9001
13	Spécifications techniques
13	Symboles
15	Garantie
15	Sécurité de base et performances essentielles
16	Dimensions et placement
17	Coordonnées

Ce manuel contient des informations essentielles relatives aux avertissements de sécurité, aux instructions d'utilisation et au montage de l'appareil. Il ne doit pas être utilisé uniquement pour l'installation ou l'entretien, mais aussi pour bien comprendre le fonctionnement global de l'équipement. Toute personne utilisant cet appareil doit être correctement informée et, si nécessaire, encadrée. Il est de votre responsabilité de vous assurer que chaque utilisateur reçoit les explications et l'assistance appropriées pour une utilisation sécurisée et efficace.

À lire au préalable

Les informations contenues dans ce manuel concernant le montage et le fonctionnement doivent être respectées intégralement. Dans le cas contraire, la garantie du produit ou la responsabilité du fournisseur peut être annulée. Si vous n'êtes pas certain que les instructions contenues dans ce manuel ont été suivies correctement, vous devez contacter le fournisseur de l'appareil.

Avant toute séance, le client doit remplir les formulaires suivants :

- ◇ Coordonnées de l'utilisateur,
 - ◇ Formulaire d'antécédents médicaux de l'utilisateur,
 - ◇ Formulaire de consentement.
- 1 | Si le Body Boost Bed S9001 (BBB S9001) ne fonctionne pas comme indiqué dans ce manuel, contactez immédiatement votre revendeur agréé Body Boost Bed.
 - 2 | Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. Le client n'est pas autorisé à effectuer des modifications, des réparations ou l'entretien de l'appareil. L'entretien ne doit être effectué que par le personnel agréé par le fabricant.
 - 3 | Le BBB S9001 ne peut être installé que si l'humidité ambiante est inférieure à 60%.
 - 4 | Lors de l'installation du BBB S9001, l'espace et les distances minimum requis doivent être respectés comme indiqué dans la section « Dimensions » de ce manuel. L'arrière du BBB S9001 et les deux côtés latéraux doivent être à au moins 30 cm du mur.
 - 5 | Toutes les pièces en plastique transparent, soit la partie sur laquelle les patients s'allongent et la partie au-dessus des patients, ne doivent pas entrer en contact avec des objets tranchants.
 - 6 | N'utilisez jamais de nettoyeurs à base d'alcool car ils peuvent endommager le plastique transparent.
 - 7 | Le BBB S9001 ne doit pas être utilisé si le plastique transparent est endommagé ou cassé.
 - 8 | Les utilisateurs doivent respecter les consignes données par le personnel habilité pour l'appareil BBB. Toute utilisation non agréée est interdite.
 - 9 | Pendant le traitement, le patient doit utiliser une protection oculaire contre les rayons infrarouges (ces lunettes vous sont fournies avec l'appareil). La puissance maximale du rayonnement optique est de 2,97 J / cm². La variation de sortie maximale est de ± 1%.
 - 10 | Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un personnel qualifié pour éviter les risques indésirables. Le BBB S9001 doit être raccordé à un réseau d'alimentation équipé d'une prise terre GND.
 - 11 | Il n'est pas recommandé d'utiliser des appareils électroniques (téléphone portable, tablette, montre, etc.) pendant le traitement.
 - 12 | Le sol devant le BBB S9001 doit être recouvert d'une couche antidérapante avec une bonne adhérence (caoutchouc ou similaire) afin d'éviter tout risque de chute lors de l'entrée ou de sortie de l'appareil.

Restrictions d'utilisation

- ◇ Grossesse et/ou allaitement,
- ◇ Enfants de moins de 7 ans,
- ◇ Maladie physique ou psychologique remettant en cause la capacité à donner son consentement,
- ◇ Les patients atteints d'un cancer sauf sur prescription médicale,
- ◇ Maladie cutanée aiguë nécessitant un traitement dermatologique
- ◇ Antécédents de photosensibilité ou utilisation récente de médicaments photosensibilisants,
- ◇ Traitement topique par corticostéroïdes,
- ◇ Poids maximal de l'utilisateur : 135kg.

Avertissements pour le client

La source lumineuse clignote selon un rythme précis. L'appareil BBB S9001 est presque complètement fermé et peut provoquer des crises de panique et de claustrophobie pendant le traitement. Dans ces cas-là, le traitement doit être arrêté immédiatement et le client doit être sous la surveillance d'un personnel médical habilité.

Information générale du BBB S9001

Le BBB S9001 est conçu pour le traitement complet du corps. L'appareil dispose de 6.750 LED (diodes proche infrarouges, diodes rouges et diodes bleues) sans émission de chaleur. Les diodes sont de haute qualité et ont une durée de vie allant jusqu'à 50.000 heures de fonctionnement.

Longueurs d'onde :

- | | |
|----------------------------------|--|
| Bleu 470nm : | Aide à détruire les bactéries responsables de l'acné et de processus inflammatoires de la peau. |
| Rouge 630nm : | Active les cellules à produire du collagène et de l'élastine, a des effets anti-inflammatoires qui aident à réduire la douleur, l'inflammation et à réduire les rougeurs associées aux picotements. |
| Proche infrarouge 940nm : | Active les cellules à produire du collagène et de l'élastine, aide à détendre les muscles et réduit les crampes musculaires, réduit les douleurs musculaires et les raideurs articulaires, soulage les douleurs dues aux raideurs associées à l'arthrite et stimule la circulation sanguine. |

Fonction de préchauffage « Welltherm »

Les LED intégrées au BBB S9001 ne dégagent pas de chaleur, c'est pourquoi l'appareil intègre la technologie « Welltherm » qui régule la température pendant le traitement à l'aide d'un flux d'air chaud. « Welltherm » procure une sensation agréable dans toutes les phases du traitement.

Technologie multifréquence

Pourquoi le BBB S9001 est-il unique dans la technologie de luminothérapie LED ?

Le BBB S9001 est équipé de 6.750 LED non thermiques (spectre bleu, rouge et proche infrarouge) qui fonctionnent simultanément en émettant la lumière aux fréquences optimales prédéfinies.

La découverte du spectre multifréquence a constitué une avancée significative dans le domaine de luminothérapie par LED.

D'un point de vue historique, cette méthode a été développée en utilisant des faisceaux laser, où l'application simultanée de toutes les fréquences nécessaires provoquait une bioactivité

maximale. Ce système est le Programme de modulation multifréquence (MFMP), également connu sous le nom de spectre multifréquence (MFS). Les résultats extrêmement positifs du MFMP sont appliqués et reconnus dans le monde entier.

Le BBB S9001 est un appareil unique qui utilise un système multifréquence dans la gamme de fréquences de 12,2HZ à 142,857 HZ. BBB S9001 est recommandé pour :

- ♦ Douleurs (musculaires et articulaires)
- ♦ Troubles de la circulation, y compris la cicatrisation des plaies
- ♦ Vieillissement de la peau et rides (rajeunissement de la peau)

Indications contraires

Noté dans la section "Restrictions d'utilisation"

Effets indésirables

- ♦ Allergie au verre acrylique
- ♦ Hypersensibilité du désinfectant. Si vous êtes allergique au désinfectant, essuyez la surface avec une lingette propre imbibée d'eau après avoir désinfecté.

Protocoles

- ◇ L'utilisateur doit être entièrement déshabillé pour utiliser le BBB S9001
- ◇ Avant le premier traitement, l'utilisateur sera informé de la façon d'utiliser la cabine.
- ◇ Séance unique de 25 minutes

Remarque

Les protocoles suivants ne sont fournis qu'à titre indicatif. Le traitement peut varier en fonction de votre problème de santé, de votre âge et d'autres facteurs.

Protocoles pour :

Troubles de la circulation, y compris la cicatrisation des plaies

- ◇ Un traitement 3 fois par semaine pendant 10 semaines, puis un traitement 2 fois par semaine pendant 3 semaines (Remarque : selon l'état de santé du patient, le médecin peut changer le protocole à 5 traitements par semaine pendant deux semaines, puis

poursuivre avec le protocole habituel.

- ◇ Une fois le protocole du traitement de base terminé, le patient doit être examiné par un médecin pour qu'il détermine la suite du traitement

Rajeunissement de la peau :

- ◇ Un traitement 3 fois par semaine pendant 15 semaines.
- ◇ Une fois le protocole du traitement de base terminé, le patient doit être examiné par un médecin pour qu'il détermine la suite du traitement

Réduction de la douleur :

- ◇ Un traitement 4 fois par semaine pendant la première semaine, puis un traitement 3 fois par semaine pendant 2 semaines.
- ◇ Une fois le protocole du traitement de base terminé, le patient doit être examiné par un médecin pour qu'il détermine la suite du traitement.

Instructions d'opération


Note importante Pendant le traitement, l'utilisateur ne doit pas porter ni vêtement, ni bijou.

Le BBB S9001 a été conçu pour être facile à utiliser. Le panneau de commande de l'écran tactile est composé de :

- ◇ Un programme préétabli : une session dure 25 minutes. (L'opération peut être arrêtée et démarrée au milieu du cycle)
- ◇ Fonction « Welltherm » pour le contrôle de la température
- ◇ Fonction de ventilation au niveau du visage
- ◇ Chaînes de sélection de musique
- ◇ Musique : fonction avant ou arrière
- ◇ Contrôle du volume

Fonctionnement

1. Sélectionnez l'option à gauche
2. Sélectionnez l'option à droite
3. Faites défiler vers le haut dans l'option sélectionnée
4. Faites défiler vers le bas dans l'option sélectionnée
5. Démarrer/ Arrêter/ Pause/ feu vert prêt à l'emploi
6. Affichage

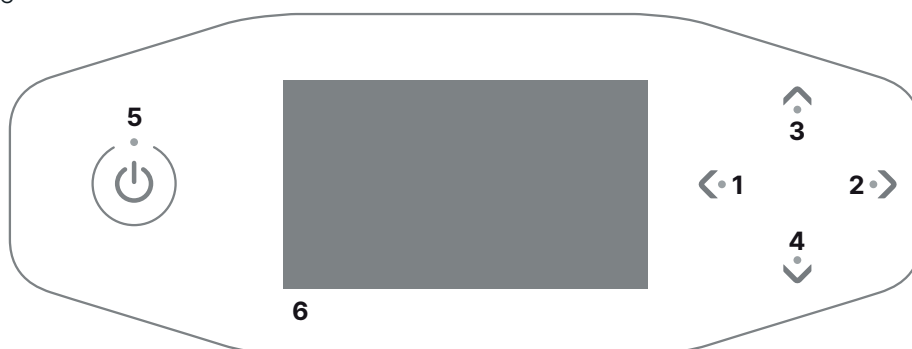


Mode autonome

Appuyez  une fois. La durée maximale de la session s'affiche sur l'écran.

Appuyez  une fois pour confirmer la durée de la séance. Le BBB S9001 est allumé et la séance commence.

Mode pause

Appuyez  une fois pendant la session pour mettre le BBB S9001 en mode pause. Les LED sont alors éteintes et la cabine reste en pause pendant un maximum de 4 minutes. Le temps restant continue d'être affiché en haut de l'écran. Appuyez sur  une fois pour redémarrer et « Garder appuyé » pendant 3 secondes pour mettre fin au traitement.

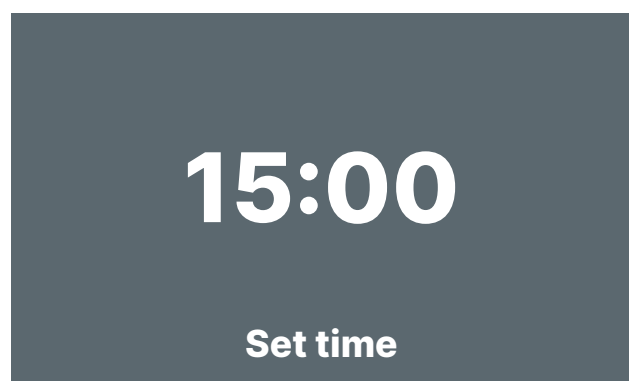


Remarque

Le décompte du temps de la session continue de fonctionner pendant le « mode pause ».

Contrôle des fonctions

Les boutons ◀ et ▶ peuvent être utilisés pour sélectionner la fonction de contrôle souhaitée. Seules les options installées seront affichées sur l'écran.

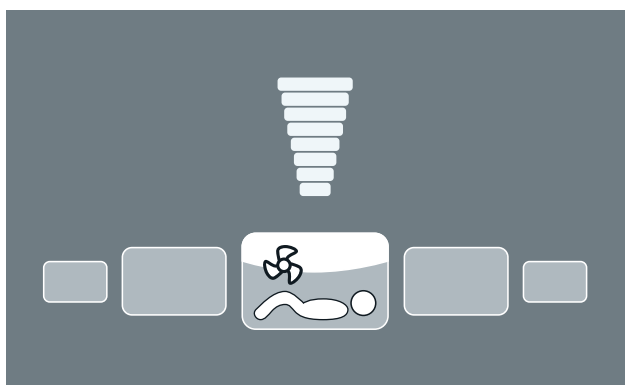

Ventilation/chauffage du corps

Le bouton ▲ peut être employé pour augmenter les ventilations inhérentes au refroidissement/chauffage sur le corps. Le bouton ▼ peut être employé pour diminuer le refroidissement/chauffage sur le corps. Le refroidissement du corps peut se régler sur 8 niveaux. Si le refroidissement corporel est mis au niveau 1 à 4, le chauffage s'éteint automatiquement. Pour être en mesure de remettre le chauffage en marche, passez la ventilation du corps au niveau 5 ou plus.

La ventilation du corps ne peut pas être éteint.




Ventilation du visage

Le bouton ▲ peut être employé pour augmenter la ventilation du visage. Le bouton ▼ peut être utilisé pour diminuer la ventilation du visage qui peut se régler sur 8 niveaux.




Les boutons ◀ et ▶ peuvent être utilisés pour sélectionner la fonction de contrôle souhaitée. Seules les options installées seront affichées sur l'écran.

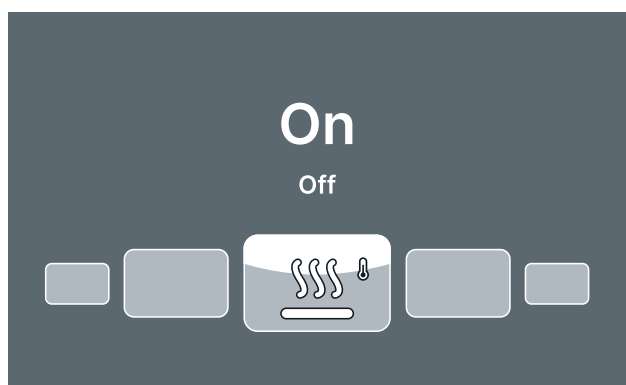

Fonction de préchauffage « Welltherm »

L'utilisateur peut au choix activer ou désactiver le chauffage (position OFF ou ON) dans le « Welltherm ». Lorsque la séance de traitement commence le chauffage sera actif.

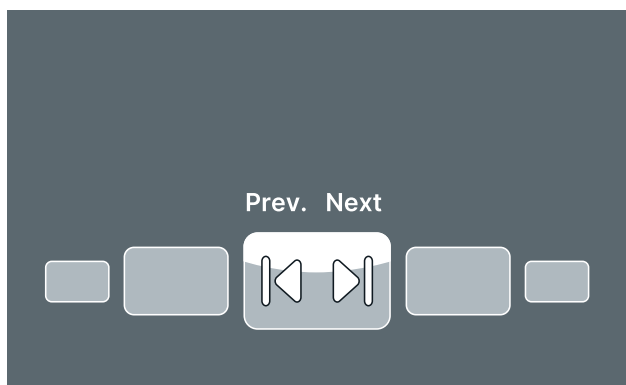


Switch song (avec système de son uniquement)

Si « Channel 1 » ou « Channel 2 » est sélectionné, la fonction 'switch song' sera activée.

Le bouton ▲ peut être utilisé pour sélectionner la chanson suivante.

Le bouton ▼ peut être utilisé pour sélectionner la chanson précédente.

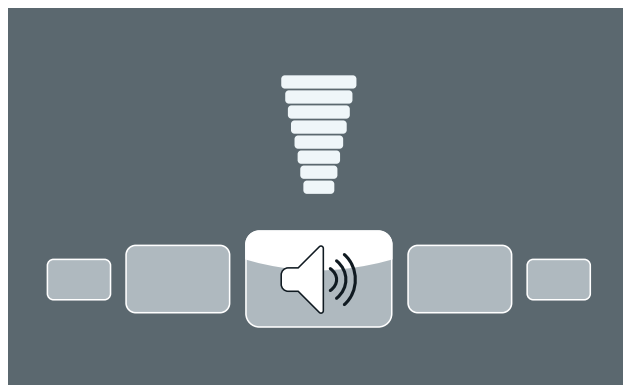

Volume de musique (avec système de son uniquement)

Le bouton ▲ peut être utilisé pour augmenter le volume des haut-parleurs.

Le bouton ▼ peut être utilisé pour diminuer le volume des haut-parleurs.

Le texte « Volume » apparaît en bas de l'écran. Le volume peut être réglé à 8 niveaux.

Messages

Dysfonctionnement

Lorsqu'un dysfonctionnement se produit, les boutons    et  clignotent lorsque la machine est en veille. La machine produit également 3 bips rapides une fois par minute. Appuyez sur les quatre boutons en même temps pour connaître les codes erreur.

En cas de défaillance critique, l'écran de dysfonctionnement s'affiche automatiquement. Le texte 'Malfunction' apparaît en haut de l'écran, et le code de défaut et une explication apparaissent en bas. Utilisez des boutons  et  pour afficher les différents messages de défaut.



Code erreur	Dysfonctionnement
E1 (en)	Dysfonctionnement interne de minuterie
E3 (en)	Erreur de communication entre le relais et la partie de commutateur
E6 (en)	Phase inconnue
E7 (en)	Échec du relais
E11 (E11)	Erreur de communication avec le tableau de ventilateur

Note

Lorsque l'un des défauts critiques mentionnés ci-dessus apparaît sur l'écran, vous ne devez plus utiliser le BBB MED S9001 et la prise électrique doit être retirée du réseau électrique. Contactez votre revendeur.

Si une autre défaillance se produit, le BBB MED S9001 sera toujours opérationnel, mais les fonctions ne seront pas entièrement disponibles. Pour corriger cela, contactez votre revendeur.



Lecture des compteurs horaires et des versions des logiciels

Menu de l'état Appuyez sur les boutons ✓ ⏻ et ➤ et maintenez pendant 5 secondes. À l'écran, sera affiché « Quick status menu ». Les compteurs d'heures et les versions logicielles peuvent être consultés ici.

Réinitialisation des compteurs d'heures À l'affichage naviguer à l'option 2 « Lamp hours » ou 3 « Facial tanner hours » et appuyez sur ➤.

Entrez le code PIN et appuyez sur ⏻

Les compteurs horaires sont maintenant réinitialisés.

Unit status	
1. Unit hours	2461
2. Lamp hours	257 >
4. Airco service date	01-01-2012
5. Display software	5.4
Display pictures	2.3
Switch board	2.3
I/O Controller	1.0
Sens Controller	1.0
Ventilation board	3.0

Nettoyage de votre BBB S9001

Le matériau acrylique protégeant la source de lumière ne doit pas être nettoyé à l'aide de solutions à base d'alcool. N'utilisez pas de pâtes abrasives ou de produits de nettoyage et veillez à ne pas rayer la surface du matériau avec des objets pointus.

Pour des raisons de bonne hygiène, l'intérieur de la cabine doit être nettoyée après chaque utilisation avec une solution de nettoyage désinfectant.

Spécifications techniques

Tension d'alimentation : 220-230 Vac

Fréquence d'approvisionnement : 50-60 Hz

Consommation d'énergie : 1 500 W

Fusible externe accessible : 2 x T6.3AH250Vac
(Temporisation, pouvoir de coupure élevé,
5x20mm)

Protection Class I

Pièce appliquée de type BF

Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg

Conditions d'exploitation

Température : 15 à 30 degrés C

Humidité relative : 40-60% HR (non condensant)

Pression atmosphérique : 700 à 1060 kPa

Conditions de stockage/transport

Température : 5 à 45 degrés C

Humidité relative : 40-80% HR (non condensant)

Pression atmosphérique : 700 à 1060 kPa

Avertissement

Le coupleur de l'appareil est considéré comme un dispositif de déconnexion du réseau. Assurez-vous que l'entrée de l'appareil est facilement accessible à tout moment pendant l'utilisation de l'appareil.

Avertissement

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, cet appareil doit être connecté à un réseau d'alimentation avec protection GND.

Avertissement

L'entretien de la cabine doit être effectué uniquement par le fabricant.

Symboles



Symbole d'avertissement

Portez les lunettes de protection fournies par les émetteurs IR (irradiation infrarouge)

Longueur d'onde de protection :
190nm-2000nm




Symbole d'avertissement

BBB S9001 doit être déconnecté de la source d'énergie



Symbole d'avertissement

Attention

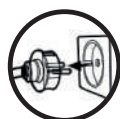

Symbole d'avertissement

Retirez la prise électrique



Symbole

Auvent



Symbole

Banc



Symbole d'avertissement

Irradiation de classe IIa



Symbole d'avertissement

Lire d'abord l'instruction pour une utilisation



Symbole d'avertissement

Poids maximum du patient



Symbole d'avertissement

Pièce appliquée de type BF



Symbole d'avertissement

Le produit indiqué sur la note de livraison ne doit pas être éliminé doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, ni dans le conteneur à verre conformément aux lignes directrices de l'UE valides au moment où l'appareil a été mis sur le marché.

Garantie

Nos appareils sont fabriqués avec la plus grande attention dans le plus grand respect des normes en vigueur. Chaque BBB S9001 est fabriqué pour répondre aux normes internationales IEC/EN. Nous fournissons une garantie fabricant de 2 ans.

Votre nouvel appareil a une garantie du fabricant de 2 ans, qui commence à la date d'installation et de mise en service. Pendant la période de garantie, tous les défauts résultant d'erreurs de matériaux ou de fabrication seront réparés sans frais. Veuillez contacter votre revendeur pour toute demande d'intervention. Afin de faire une réclamation en vertu des termes de cette garantie, vous devez être en mesure de produire le numéro de série.

Ne sont pas couverts par la garantie

Appareils dont le type, le numéro de série et/ou d'autres étiquettes d'identification aient été retirés, endommagés ou modifiés.

Dommages causés par l'acheteur, la négligence, le transport, l'utilisation inappropriée ou l'entretien inapproprié.

Dommages dus à l'utilisation d'accessoires non fournis à l'origine par Body Boost Bed ou accessoires de qualité inférieure.

Sécurité de base et performances essentielles

Le BBB S9001 est une cabine à leds équipée de 6750 diodes LED non thermiques (bleu, rouge et quasi infrarouge) émettant sur plusieurs fréquences simultanément avec tous les paramètres pré-réglés pour un traitement optimal. Multi-fréquence couvre l'ensemble du spectre de la biofréquence et vont de 12,2Hz jusqu'à plus de 142 857 Hz. **(Body Boost Beds multi-fréquences s'étend de 12,2Hz jusqu'à plus de 142.857 Hz).** Il balaie l'ensemble du spectre de fréquences avec la même intensité. De cette

façon, il active chaque cellule pour absorber l'énergie (lumière) sur sa propre fréquence.

BBB S9001 est conçu pour fonctionner dans des conditions environnementales optimales pour les performances de l'appareil. Peut être utilisé dans des locaux commerciaux.



Sécurité de base et performances essentielles

Avertissement

L'utilisation de BBB S9001 adjacente ou empilée avec d'autres équipements doit être évitée parce qu'elle pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, BBB S9001 et l'autre équipement doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.

Câble recommandé pour le cordon principal avec les caractéristiques suivantes : H05V-k 3x0.75 mm². Son remplacement ne peut être effectué que par une personne autorisée.

Avertissement

L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement pourrait entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner des opérations.

Avertissement

L'équipement de communication RF portable (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doit pas être utilisé à moins de 30 cm (12 pouces) à partir de n'importe quelle partie du BBB MED S9001, y compris ses câbles.

L'appareil n'est pas nocif pour l'utilisateur ou l'opérateur lorsqu'il est utilisé dans un environnement testé et avec une installation appropriée comme suggéré dans ce manuel. Il n'y a aucun risque de perdre les performances de l'appareil. Il n'y a pas de réponses involontaires ni de changement de mode de fonctionnement.

Émissions par conduction

L'appareil répond aux exigences de l'équipement de classe B du groupe 1 selon le CISPR 11.

Rayonnement émis

L'appareil répond aux exigences de l'équipement de classe B du groupe 1 selon le CISPR 11.

BBB MED S9001 est conforme aux exigences d'émissions EN 60601-1-2 Edition 4 - CISPR 11 - Équipement de classe B du groupe I, IEC/EN 61000-3-2 et IEC/EN 61000-3-3-3.



Décharge électrostatique

Mode de fonctionnement		Programme de thérapie avec chauffage et ventilateurs ON		
Niveau de décharge (kV)	Polarité	Point d'essai	Contact décharge	Décharge d'air
2	+/-			X
4				X
8				X
15				X
8	+/-		X	
Changements de fonctionnement observés pendant les essais : aucun changement observé				

N'utilisez jamais d'appareil dans un environnement de sources fortes d'EMC, comme des dispositifs de résonance magnétique, des scanners ou autres.

Champs électromagnétiques RF

Mode de fonctionnement	Programme de thérapie avec chauffage et ventilateurs ON		
Fréquence	Niveau	Modulation	Point d'essai
80MHz - 2700MHz	10 V/m	80%	Enceinte
Changements de fonctionnement observés pendant les essais : aucun changement observé			



Champs de proximité de l'équipement de communication sans fil RF

Gamme et niveau de fréquence : Matériel de communication sans fil RF		
Fréquence (MHz)	Modulation	Immunité Niveau (V/m)
385 450	**Modulation de l'impulsion 18Hz *FM Écart de 5Hz : 1kHz sine	27 28
710 745 780	**Modulation de l'impulsion 217Hz	9
810 870 930	**Modulation de l'impulsion 18Hz	28
1720 1845 1970	**Modulation de l'impulsion 217Hz	28
2450	**Modulation de l'impulsion 217Hz	28
5240 5500 5785	**Modulation de l'impulsion 217Hz	9

Transitoire/test d'immunité à l'éclatement

Mode de fonctionnement	Programme de thérapie avec chauffage et ventilateurs ON		
Point d'essai	Polarité	Niveau d'essai (kV)	
AC Port L et N et PE	+/-	2	
Changements de fonctionnement observés pendant les essais : aucun changement observé			

Test d'immunité de surtension

Mode de fonctionnement	Programme de thérapie avec chauffage et ventilateurs ON			
Point d'essai	Polarité	Angle (°)	Niveau d'essai (kV)	Point d'essai
L-N	+/-	0, 90, 180, 270	0.5, 1	AC
L-ON	+/-	0, 90, 180, 270	0.5, 1, 2	AC
Changements de fonctionnement observés pendant les essais : aucun changement observé				

Immunité aux perturbations conduites induites par les champs RF (CS)

Mode de fonctionnement	Programme de thérapie avec chauffage et ventilateurs ON		
Fréquence	Niveau	Modulation	Point d'essai
150kHz - 80MHz	3V	80%	AC
Changements de fonctionnement observés pendant les essais : aucun changement observé			


Test d'immunité de champ magnétique

Mode de fonctionnement	Programme de thérapie avec chauffage et ventilateurs ON		
Fréquence (Hz)	Polarité	Force de champ (A/m)	Point d'essai
50, 60	X, Y, Z	30	Boîtier
Changements de fonctionnement observés pendant les essais : aucun changement observé			

Test d'immunité aux creux de tension et aux coupures brèves (DIP)

Mode de fonctionnement	Programme de thérapie avec chauffage et ventilateurs ON		
Phénomènes		Niveau d'essai (DIP)	Durée (en périodes)
Baisse de tension		100%	0,5 (toutes les phases)
Baisse de tension		100%	1 (seulement à 0 euros)
Baisse de tension		30%	25 (seulement à 0 euros)
Interruptions de tension		100%	250 (seulement à 0 euros)
L'appareil s'arrête. Le redémarrage du programme de thérapie doit être fait. Aucune PERFORMANCE ESSENTIELLE et SÉCURITÉ DE BASE corrompues.			

Dimensions et placement

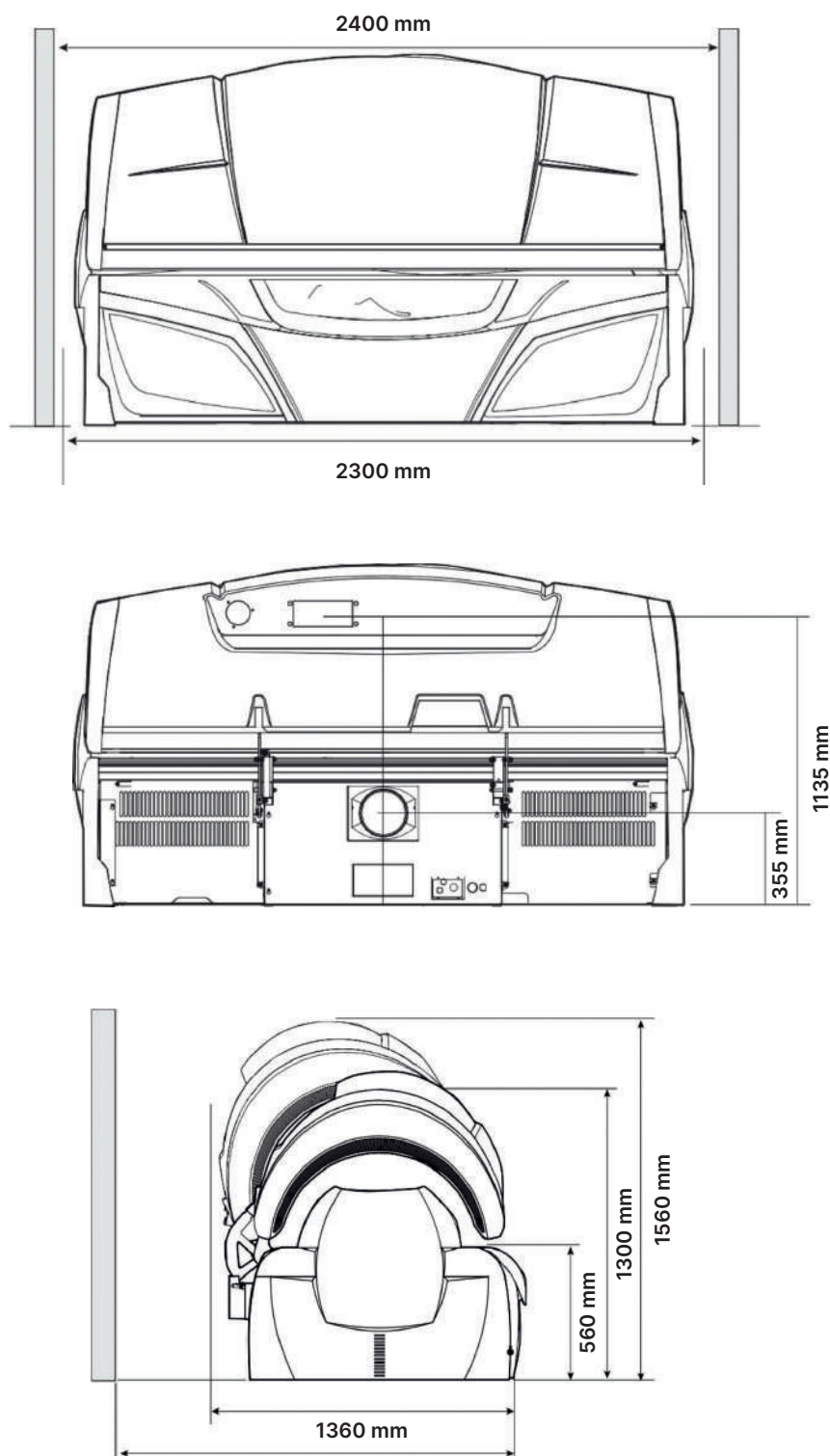



BODY BOOST BED D.O.O

13. Oktobra 42 - 11231 Belgrade - SERBIA

www.bodyboostbed.com

e-mail : info@bodyboostbed.com

Tél. : 381 11 4071859

EU REPRESENTATIVE

LEGIREP, ZASTOPNIŠTVO, SVETOVANJE IN STORITVE, D.O.O.

Poslovna cona A 35 - 4208 Šenčur - Slovenia

e-mail : info@legirep.eu

Distributeur pour les pays francophones :

SAS Bioledtherapy

40 place du théâtre, Palais de la bourse 59800 Lille - France

contact@bioledtherapy.com | Tél. : +33 3 62 02 82 20