

# Document d'information relatif aux exclusions, contre-indications et précautions d'utilisation

La société ..... propose dans son centre basé à ..... la réalisation de séances de photobiomodulation, au moyen du Body Boost Bed™, un dispositif médical européen de classe IIa.

Ce dispositif est destiné à soulager :

- ◇ les troubles de la circulation sanguine, y compris la cicatrisation des plaies
- ◇ les rides et ridules (rajeunissement de la peau)
- ◇ la douleur (douleurs musculaires et articulaires)

Le Body Boost Bed est une cabine horizontale 360° équipée de 6 750 diodes LED avec tous les paramètres prédéfinis pour un traitement optimal.

Le Client a une interaction minimale avec le dispositif médical. Il peut démarrer la session, mettre en pause la session et mettre fin à la session. La session se termine automatiquement après 25 minutes.

Le Client déclare avoir reçu, pris connaissance et accepté avant la Commande et, au plus tard avant la première séance, le présent document d'information relatif aux exclusions, contre-indications et précautions d'utilisation qui constitue une annexe aux CGV de la société .....

## Exclusions d'utilisation

- ◇ Maladie cutanée aiguë nécessitant un traitement dermatologique
- ◇ Grossesse et/ou lactation
- ◇ Épilepsie, antécédent de photosensibilité ou utilisation de médicaments photosensibilisants
- ◇ Claustrophobie
- ◇ Cancer aigu ou antérieur sauf sur autorisation d'un professionnel de santé
- ◇ Enfant de moins de 7 ans
- ◇ Poids maximal de l'utilisateur : 135 kg

## Avertissements pour le client

### Effets secondaires :

- ◇ Allergie au verre acrylique
- ◇ Hypersensibilité au désinfectant. Si vous êtes allergique au désinfectant, essuyez la surface avec une lingette propre imbibée d'eau après avoir désinfecté.

## Protocoles

- ◇ L'utilisateur doit être entièrement déshabillé pour utiliser le BBB S9001
- ◇ Avant le premier traitement, l'utilisateur sera informé de la façon d'utiliser la cabine.
- ◇ Séance unique de 25 minutes

**REMARQUE :** Les protocoles suivants ne sont qu'un guide. Les traitements peuvent varier en fonction de la gravité de l'état et l'âge de l'utilisateur ainsi que d'autres facteurs.

### Protocoles pour :

#### Circulation du sang :

- ◇ Une session 3 fois par semaine pendant 10 semaines puis une seule session 2 fois par semaine pendant 3 semaines

#### Lignes et rides, raffermissement de la peau :

- ◇ Une session 3 fois par semaine pendant 15 semaines

#### Réduction de la douleur :

- ◇ Une session 2 fois par semaine pendant 2 semaines

**Note importante :** l'utilisateur ne doit porter ni vêtement, ni bijou.

**Le Client reconnaît avoir lu attentivement le présent document et déclare ne pas présenter d'exclusion ni de contre-indication aux séances de photobiomodulation.**

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Fait à : \_\_\_\_\_

Le : \_\_\_\_\_

Signature